

# INSTRUKCJA OBSŁUGI KONCENTRATORA TLENU

Przewodnik bezpiecznej tlenoterapii domowej

## I. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA (KROK PO KROKU)

1. ZASILANIE: Urządzenie musi być przez cały czas pracy podłączone do sprawnego gniazdka elektrycznego (220V).
2. NAWILŻACZ: \* Do pojemnika wlej wyłącznie wodę destylowaną.
  - o Poziom wody musi znajdować się między liniami MIN a MAX.
  - o Wodę wymieniaj obowiązkowo minimum raz w tygodniu.
3. MONTAŻ: Nawilżacz zamontuj do koncentratora (zależnie od modelu: bezpośrednio do obudowy lub za pomocą krótkiego wężyka).
4. AKCESORIA: Wąsy tlenowe lub maskę podłącz do wylotu znajdującego się w górnej części nawilżacza.
5. URUCHOMIENIE: Włącz urządzenie głównym przełącznikiem (zazwyczaj na górze lub z przodu obudowy).
6. USTAWIENIE TLENU: Za pomocą pokrętła ustaw pływak na wartości zalecanej przez lekarza.
7. FILTR: Raz dziennie wyjmij filtr gąbkowy (z tyłu urządzenia), wytrzep go z kurzu i włóż z powrotem.

## II. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Gdzie ustawić koncentrator?

- ODLEGŁOŚĆ: Zachowaj minimum 10 cm odstępu od ścian i mebli, aby zapewnić chłodzenie.
- PODŁOŻE: Stawiaj urządzenie wyłącznie na twardym i płaskim podłożu. Nie stawiaj go na dywanie, łóżku czy kanapie (grozi to przegrzaniem i awarią).
- POWIETRZE: Pomieszczenie musi być wentylowane, wolne od dymu, spalin i pyłu.

Czego kategorycznie zabrania się robić?

- OGIEŃ: Całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia w pobliżu urządzenia! Tlen gwałtownie podtrzymuje palenie.
- ZAKRYWANIE: Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, ubrań ani pojemników z płynami.
- SŁOŃCE: Unikaj stawiania koncentratora w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych.

## III. UWAGI TECHNICZNE

- HAŁAS: Jeśli urządzenie pracuje głośno, upewnij się, że stoi prosto na twardej powierzchni.
- NAPIĘCIE: W przypadku niestabilnej sieci elektrycznej (częste spadki napięcia), zalecamy stosowanie stabilizatora napięcia.
- WARUNKI: Nie używaj urządzenia w bardzo wilgotnych lub skrajnie zimnych/gorących pomieszczeniach.



**OBEJRZYJ FILM**



 602 110 100

 produktymedyczne.pl

 biuro@produktymedyczne.pl

 <https://www.facebook.com/produktymedyczne>