

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSŁUGI PODNOŚNIKA PACJENTA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Hamulce: Zawsze blokuj koła podnośnika podczas zapinania pasów i sadzania pacjenta na wózek.
- Pasy udowe: Muszą być skrzyżowane i przeprowadzone POD UCHWYTAMI UDOWYMI. To gwarantuje, że pacjent nie wysunie się z siedziska.
- Obserwacja: Podczas podnoszenia utrzymuj kontakt wzrokowy z pacjentem i sprawdzaj napięcie pasów.

1. PRZYGOTOWANIE CHUSTY (NOSIDŁA)

- Metoda obrotowa: Obróć pacjenta na bok, podłóż zwiniętą chustę pod plecy, obróć na drugi bok i wyprostuj materiał.
- Pozycjonowanie: Górna krawędź chusty (z zagłówkiem) powinna znajdować się nad ramionami.
- Pasy dolne: Przeciągnij pasy między nogami pacjenta. To najważniejszy krok zapobiegający wypadnięciu!

2. PODEJŚCIE PODNOŚNIKIEM

- Rozstaw płóz: Użyj dźwigni nożnej, aby rozszerzyć płozy podnośnika – zwiększa to stabilność i pozwala podejść pod szerokie fotele lub łóżka.
- Ustawienie ramienia: Podjedź tak, aby metalowy hak (orczyk) znajdował się bezpośrednio nad pępkiem pacjenta, w pozycji poprzecznej do ciała.
- Zablokuj koła podnośnika.

3. MOCOWANIE I PODNOSZENIE

- Wybór pętli: Pętle mają kolory. Używając krótszych pętli, uzyskasz pozycję bardziej siedzącą. Używając dłuższych, pacjent będzie w pozycji półleżącej.
- Zapięcie: Załóż pętle na haki orczyka (najpierw ramiona i głowa, potem nogi).
- Góra/Dół: Użyj pilota. Podnoś pacjenta do momentu, aż jego pośladki znajdą się kilka centymetrów nad materacem. Odblokuj koła podnośnika przed odjazdem od łóżka.

4. SADZANIE NA WÓZKU LUB FOTELU

- Celowanie: Podjedź nad siedzisko. Rozszerz płozy podnośnika, aby objęły wózek.
- Kontrola: Podczas opuszczania (przycisk "w dół") chwyć za uchwyty z tyłu chusty i lekko dociśnij pacjenta w stronę oparcia, aby usiadł głęboko.
- Wyjmowanie: Odepnij pasy, wyciągnij materiał spod nóg, pochyl pacjenta do przodu i wysuń chustę zza pleców.

SYSTEMY RATUNKOWE (CO JEŚLI BRAKNIĘ PRĄDU?)

Podnośnik jest wyposażony w potrójne zabezpieczenie:


1. Czerwony przycisk (Grzybek): Wyłącznik awaryjny. Wciśnięcie odcina prąd. Przekreśl go, aby przywrócić działanie.
2. Ręczne opuszczanie: Jeśli bateria padnie całkowicie, kręć czerwonym pierścieniem na siłowniku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Ramię opuści się powoli i bezpiecznie bez użycia prądu.

Ważne: Podnośnik podczas ładowania nie jest aktywny. Użytkowanie możliwe wyłącznie po odłączeniu ładowarki.



OBEJRZYJ FILM



 602 110 100

 produktymedyczne.pl

 biuro@produktymedyczne.pl

 <https://www.facebook.com/produktymedyczne>